
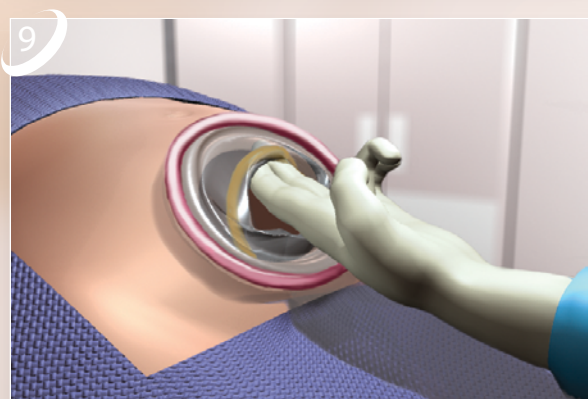
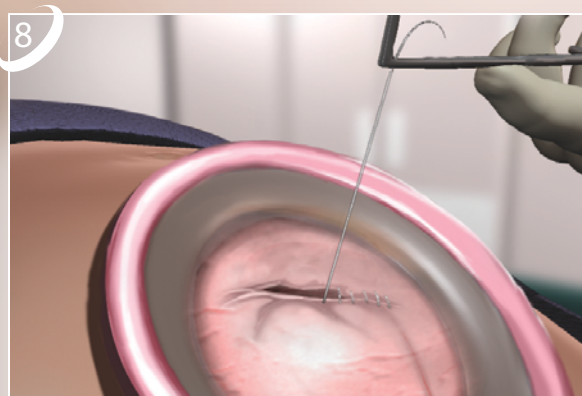
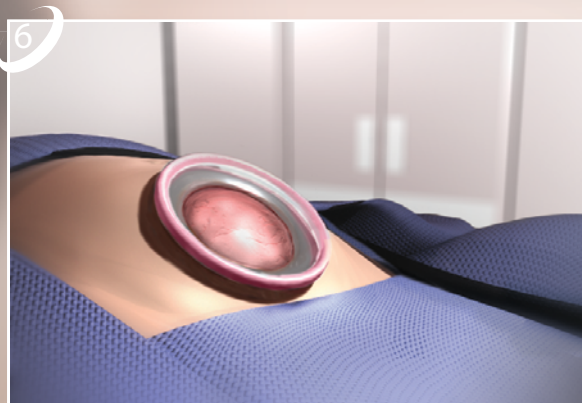
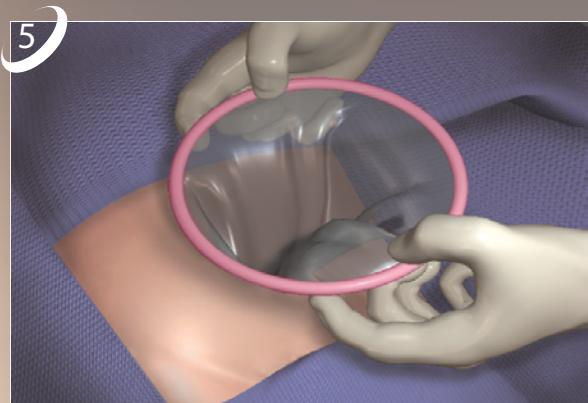
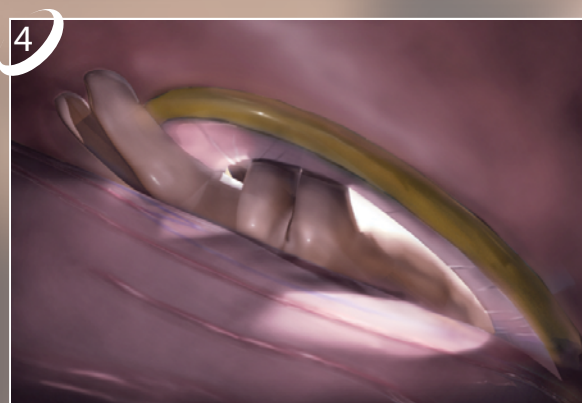
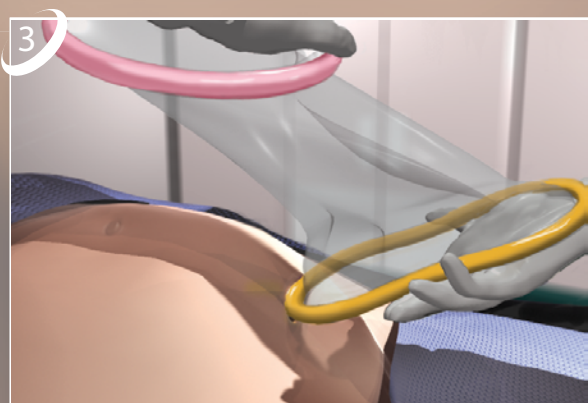
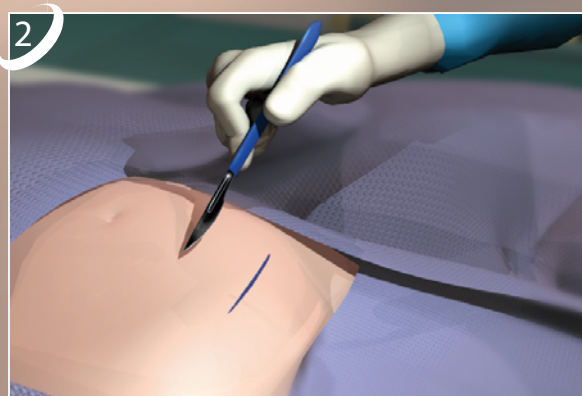


Alexis® O

Separador Quirúrgico para Cesárea*

Guía de colocación

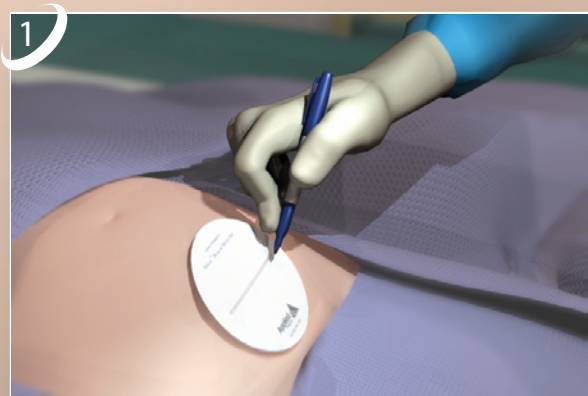

Preparar el campo quirúrgico de acuerdo con el procedimiento estándar, asegurándose que la piel está limpia y seca.

1. Colocar la plantilla sobre el lugar de la incisión, y marcar la longitud apropiada de la línea de incisión utilizando un marcador estéril.
2. Hacer una incisión abdominal a lo largo de la línea de incisión marcada.
3. Inserte el anillo naranja del Separador quirúrgico Alexis O para Cesárea de tal forma que la porción inferior esté ligeramente superior al hueso púbico, entre la pared abdominal y la vejiga.
4. Comprobar cuidadosamente que no se ha atrapado ningún órgano o tejido antes de comenzar la retracción.
5. Agarre suavemente el anillo rosa de retracción en la posición 10 y 2 del reloj y tirar hasta que el anillo naranja se sitúe firmemente contra la capa del peritoneo. Gírelo hacia adentro hasta que se alcance la retracción deseada.
6. Compruebe por segunda vez que no se ha atrapado ningún órgano o tejido. (Ver figura 4)
7. Realizar la cesárea a través de la zona de incisión retraída y protegida 360°.
8. Hacer los puntos de sutura internos necesarios a través de la zona de incisión retraída.
9. Retirar el separador quirúrgico Alexis O para Cesárea retirando suavemente el anillo naranja de la cavidad peritoneal.

Para las instrucciones completas de uso consultar la ficha de instrucciones.

*G6313 (Grande) y G6314 (Extra-Grande) están indicados para utilizar en Cesáreas que no sean de urgencia.



<http://contact.appliedmedical.com/>

Para más información
www.appliedmedical.com/alexis

Applied Medical



© 2013 Applied Medical Resources Corporation. Todos los derechos reservados.
Applied Medical, el diseño del logotipo de Applied Medical, ProTerra, el diseño del logotipo de ProTerra y las marcas designadas con el símbolo * son marcas registradas de Applied Medical Resources Corporation, registradas en uno o más de los siguientes países: Australia, Canadá, Japón, Estados Unidos y / o la Unión Europea. SC01345A-SP